

# LENTE DE CONTATO 1-DAY ACUVUE MOIST® PARA ASTIGMATISMO COM LACREON®



## PARÂMETROS (Astigmatismo)

### Graus negativos e plano:

- Plano a -6,00 D (incrementos de 0,25 D)
- Cilindros: -0,75 DC / -1,25 DC / -1,75 DC. Eixos: 10° a 180° (intervalos de 10°)
- Cilindro: -2,25 DC. Eixos: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 110°, 160°, 170°, 180°
- -6,50 D a -9,00 D (incrementos de 0,50 D)
- Cilindros: -0,75 DC / -1,25 DC / -1,75 DC. Eixos: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

### Graus positivos:

- +0,25 D a +4,00 D (incrementos de 0,25 D)
- Cilindros: -0,75 DC / -1,25 DC / -1,75 DC.
- Eixos: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

ESFÉRICO PARA ÓCULOS	1-DAY ACUVUE MOIST® PARA ASTIGMATISMO COM LACREON®	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS									
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00
+3,75	+4,00										
+3,50	+3,75										
+3,25	+3,50										
+3,00	+3,00	CIL -0,75		CIL -1,25		CIL -1,75		TESTE -1,75			
+2,75	+2,75										
+2,50	+2,50										
+2,25	+2,25										
+2,00	+2,00										
+1,75	+1,75										
+1,50	+1,50										
+1,25	+1,25										
+1,00	+1,00										
+0,75	+0,75										
+0,50	+0,50										
+0,25	+0,25										

ESFÉRICO PARA ÓCULOS	1-DAY ACUVUE MOIST® PARA ASTIGMATISMO COM LACREON®	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS									
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00
Plano	Plano										
-0,25	-0,25										
-0,50	-0,50										
-0,75	-0,75										
-1,00	-1,00										TESTE CIL -2,25
-1,25	-1,25										
-1,50	-1,50										
-1,75	-1,75										
-2,00	-2,00										
-2,25	-2,25										
-2,50	-2,50										
-2,75	-2,75										
-3,00	-3,00										
-3,25	-3,00										
-3,50	-3,25										
-3,75	-3,50										
-4,00	-3,75										
-4,25	-4,00		CIL -0,75		CIL -1,25		CIL -1,75		CIL -2,25		
-4,50	-4,25										
-4,75	-4,50										
-5,00	-4,75										
-5,25	-5,00										
-5,50	-5,25										
-5,75	-5,25										
-6,00	-5,50										
-6,25	-5,75										
-6,50	-6,00										
-6,75	-6,00										
-7,00	-6,50										
-7,25	-6,50										
-7,50	-6,50										
-7,75	-7,00										
-8,00	-7,00										
-8,25	-7,50										
-8,50	-7,50										
-8,75	-8,00										
-9,00	-8,00										
-9,25	-8,50										
-9,50	-8,50										
-9,75	-9,00										
-10,00	-9,00										

CIL -0,75
CIL -1,25
CIL -1,75
CIL -2,25
Teste CIL -2,25
Teste com a lente 1-DAY ACUVUE MOIST® com LACREON®

\*Calculado para uma distância ao vértice de 12 mm.

# LENTE DE CONTATO ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO COM HYDRACLEAR® PLUS



## PARÂMETROS (Astigmatismo)

### Graus negativos e plano:

- Plano a -6,00 D (incrementos de 0,25 D)
  - -6,50 D a -9,00 D (incrementos de 0,50 D)
- Cilindros: -0,75 DC / -1,25 DC / -1,75 DC / -2,25 DC / -2,75 DC  
Eixos: 10° a 180° (intervalos de 10°)

### Graus positivos:

- +0,25 D a +6,00 D (incrementos de 0,25 D)
- Cilindros: -0,75 DC / -1,25 DC / -1,75 DC / -2,25 DC / -2,75 DC  
Eixos: 10° a 180° (intervalos de 10°)

PODER ESFÉRICO DOS ÓCULOS	ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO COM HYDRACLEAR® PLUS	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS													
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00
+5,50	+6,00														
+5,25	+5,50														
+5,00	+5,25														
+4,75	+5,00														
+4,50	+4,75														
+4,25	+4,50														
+4,00	+4,25														
+3,75	+4,00														
+3,50	+3,50														
+3,25	+3,25														
+3,00	+3,00														
+2,75	+2,75														
+2,50	+2,50														
+2,25	+2,25														
+2,00	+2,00														
+1,75	+1,75														
+1,50	+1,50														
+1,25	+1,25														
+1,00	+1,00														
+0,75	+0,75														
+0,50	+0,50														
+0,25	+0,25														

PODER ESFÉRICO DOS ÓCULOS	ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO COM HYDRACLEAR® PLUS	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS													
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00
PLANO	PLANO														
-0,25	-0,25														
-0,50	-0,50														
-0,75	-0,75														
-1,00	-1,00														
-1,25	-1,25														
-1,50	-1,50														
-1,75	-1,75														
-2,00	-2,00														
-2,25	-2,25														
-2,50	-2,50														
-2,75	-2,75														
-3,00	-3,00														
-3,25	-3,25														
-3,50	-3,50														
-3,75	-3,75														
-4,00	-4,00														
-4,25	-4,00														
-4,50	-4,25														
-4,75	-4,50														
-5,00	-4,75														
-5,25	-5,00														
-5,50	-5,00														
-5,75	-5,25														
-6,00	-5,50														
-6,25	-5,75														
-6,50	-6,00														
-6,75	-6,00														
-7,00	-6,50														
-7,25	-6,50														
-7,50	-6,50														
-7,75	-7,00														
-8,00	-7,00														
-8,25	-7,50														
-8,50	-7,50														
-8,75	-8,00														
-9,00	-8,00														
-9,50	-8,50														
-10,00	-9,00														